

Écran facial pare-visage avec mousse CPI GLOBAL



Référence (SKU) : LHA10076

Réf. fournisseur : Pare-Visage

DESCRIPTION

C'est un écran personnel. Il peut être réutilisé mais ne doit pas changer d'utilisateur.

Nous recommandons donc que l'utilisateur inscrive son nom ou une marque distinctive au feutre indélébile (sur l'extérieur).

La visière doit toujours être à l'extérieur du serre-tête.

Le dispositif doit être nettoyé après chaque usage et rangé dans un endroit propre et fermé entre deux utilisations afin de s'assurer qu'il ne soit pas contaminé.

Le nettoyage peut être fait avec de l'eau de javel, de l'eau savonneuse ou des produits d'entretien habituels (en respectant le temps de contact indiqué), le port de gants est indispensable dans cette opération.

Ne pas utiliser des solvants pour ce nettoyage.

Enfin, les recommandations ci-dessus ne concernent pas le milieu médical qui a des protocoles spécifiques.

La personne portant cet écran doit veiller à se positionner autant que possible face à son interlocuteur, visière bien

mise en écran entre les visages.

Elle doit couvrir les yeux, le nez et la bouche.

Nous tenons, à préciser que ce produit n'est pas homologué (il a été créé dans l'urgence en réponse à la crise sanitaire) mais a été porté à la connaissance de la CRAMIF et à travers elle de l'INRS

(Institut national de recherche et de sécurité), qui a formulé des recommandations qui ont été reprises ci-dessus.

Livré en kit avec notice de montage (visière + sangle + mousse).

Photo non contractuelle : couleur de la sangle noire.